

OTO

Parity

PY-01

Инструкция пользователя

Авторское право

Все права защищены. Никакая часть из содержания этого документа, или его полное содержание, не может быть воспроизведено, передано, переведено, и сохранено на любом языке или компьютере, на любой форме или каким-либо другим способом без предварительного письменного разрешения компании ОТО.

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление.....	3
Меры безопасности.....	3
Состав кресла.....	6
Перемещение кресла.....	7
Пульт управления.....	8
Функции массажа.....	9
Порядок работы.....	10
Устранение проблем	13
Хранение и обслуживание.....	14
Спецификация	14

ВСТУПЛЕНИЕ

Благодарим Вас за покупку массажного кресла ОТО PARITY, которое принесет Вам только положительные эмоции от использования. Вся продукция ОТО уже прошла проверку и отвечает требованиям безопасности и качества для использования в домашних условиях. Пожалуйста, перед использованием массажного кресла внимательно прочитайте эту инструкцию, чтобы знать, как его эксплуатировать.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Вилка должна быть плотно вставлена в розетку. Неправильное подключение заземляющего провода может привести к поражению электрическим током.

Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или техническим специалистом, если у Вас есть сомнения относительно правильности заземления массажного кресла. Не меняйте вилку, поставляемую вместе с креслом. Если розетка не подходит к вилке, пожалуйста, замените розетку, которая должна устанавливаться квалифицированным электриком.

При использовании массажного кресла следует соблюдать основные меры безопасности, которые снижают риск поражения электротоком, возникновения ожогов, пожара или травм.

Ознакомьтесь со следующими рекомендациями перед использованием:

1. Пожалуйста, убедитесь, что Вы подключили массажное кресло к розетке с заземлением.
2. Убедитесь, что вилка надежно вставлена в розетку, чтобы уменьшить риск короткого замыкания и возгорания.
3. Сразу же после использования и перед чисткой всегда отключайте массажное кресло от электрической розетки.
4. Не используйте кресло в местах с высокой влажностью воздуха.
5. Не используйте кресло на открытом воздухе и избегайте попадания на него прямых солнечных лучей.

6. Если во время использования кресла отключилась электроэнергия, не забудьте перевести выключатель питания в положение ВЫКЛ и отсоединить вилку из розетки, чтобы избежать повреждения кресла при возобновлении электропитания.
7. Никогда не используйте массажное кресло, если кабель питания мокрый или поврежден.
8. Никогда не вставляйте/отключайте вилку питания из розетки мокрыми руками .
9. Не оставляйте кресло без присмотра, если в помещении находятся лица (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями.
10. Используйте кресло только по его прямому назначению, описанному в данном руководстве.
11. Не используйте неоригинальные комплектующие при ремонте кресла.
12. Во избежание травм, запрещено стоять, сидеть или прыгать на подставке для ног, когда массажное кресло используется.
13. Во избежание травм, не пытайтесь встать на спинку или подлокотники кресла.
14. Не засыпайте во время сеанса массажа .
15. Всегда держите массажное кресло в чистоте и никогда не вставляйте посторонние предметы в отверстия массажного кресла.
16. Не пытайтесь перемещать массажное кресло, потянув за шнур питания.
17. Перед включением кресла убедитесь, что спереди, сзади или снизу нет детей, домашних животных или препятствий.
18. Всегда проверяйте состояние поверхности массажного кресла на целостность перед его использованием. Если Вы обнаружите какие-либо разрывы в любой области обивки на спинке массажного кресла, прекратите его эксплуатацию. Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр ОТО за консультацией и ремонтом.
19. Это массажное кресло предназначено только для домашнего использования.
20. Если Вы страдаете от каких-либо заболеваний, пожалуйста обратитесь к врачу за консультацией перед использованием массажного кресла.
21. Следующие лица должны проконсультироваться с врачом перед использованием массажного кресла для того, чтобы снизить риск обострения или травм:
 - Те, кто имеют злокачественную опухоль
 - Те, кто страдает от болезней сердца
 - Женщины во время беременности, менструации или в послеродовом периоде
 - Те, кому требуется полный покой
 - Те, кто находится под наблюдением врача
 - Те, кто страдает от боли в спине
 - Те, у кого встроен кардиостимулятор или аналогичное медицинское оборудование

- Те, у кого искривление позвоночника
 - Те, у кого слабые или переломанные кости, особенно кости спины
 - В послеоперационный период
 - Те, у кого остеопороз
 - Те, у кого есть проблемы с циркуляцией крови или тромбоз
 - Те, у кого есть кожные инфекции
 - Те, у кого имеются физические аномалии
 - Те, у кого были травмы или заболевания спины и позвоночника, в результате несчастного случая или болезни
22. Если Вы испытываете боль во время использования массажного кресла, немедленно прекратите массаж. Обратитесь к врачу за консультацией.
 23. Никогда не массируйте опухшие или воспаленные участки тела.
 24. Это массажное кресло не является профессиональным и предназначено для обеспечения комфортного массажа. Не используйте массажное кресло в качестве замены медицинского лечения.
 25. Каждый сеанс массажа не должен превышать 30 минут. Массаж отдельной зоны не должен продолжаться более 15 минут. Увеличение рекомендованного времени массажа может привести к перегреву массажного кресла, что снижает общий срок его эксплуатации.
 26. Не используйте массажное кресло в помещениях с концентрацией аэрозольной продукции.
 27. Массажное кресло не предназначено для детей с возрастом ниже 12 лет.


ВНИМАНИЕ!

- Массажное кресло не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, без присмотра или руководства лиц, ответственных за их безопасность.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с массажным креслом.
- Массажное кресло нагревается во время работы. Лица, чувствительные к теплу должны проявлять особую осторожность при использовании кресла.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен оригинальным шнуром или шнуром, рекомендованным производителем или его сервисным центром.


Электромагнитные поля (ЭМП)

Продукция ОТО соответствует действующим стандартам по отношению к воздействию электромагнитных полей (ЭМП). При правильном применении массажного кресла согласно инструкции, приведенной в данном руководстве, кресло является безопасным, что основано на научных данных, доступных на сегодняшний день.

СОСТАВ КРЕСЛА

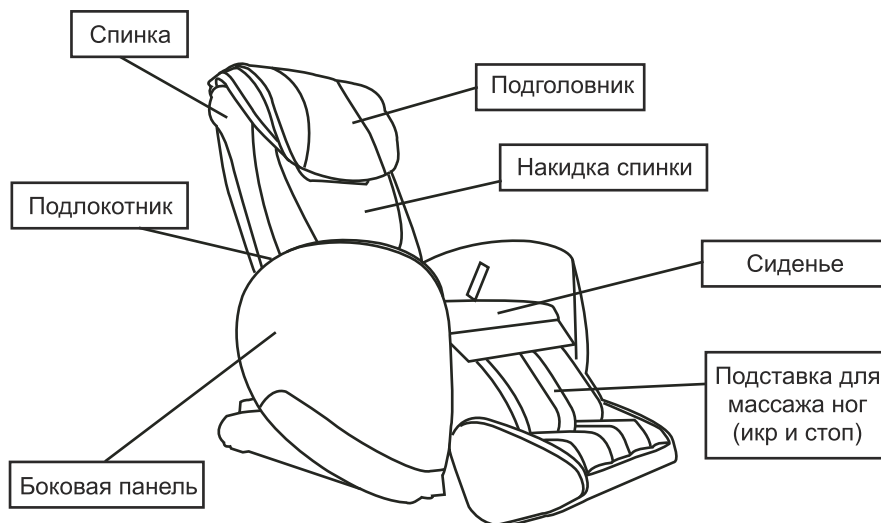

Воздушно-компрессионные подушки и воздушные клапаны

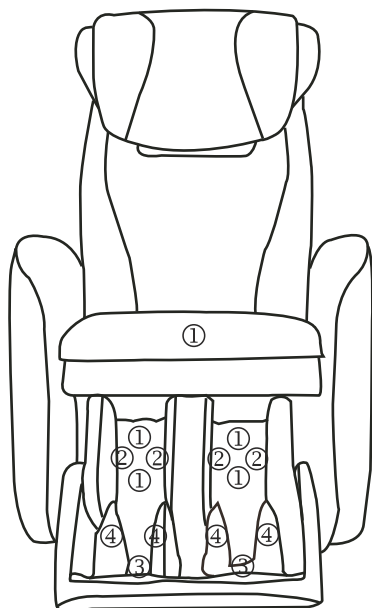

	РУ-01
Ноги и Сиденье	(1) Внутренняя сторона икр и сиденье - 1 клапан Всего 5 подушек (2) Боковые стороны икр - 1 клапан Всего 4 подушки (3) Область подошвы стоп - 1 клапан Всего 2 подушки (4) Боковые стороны стоп - 1 клапан Всего 4 подушки
Общее количество	4 воздушных клапана 15 воздушных подушек


ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КРЕСЛА

1. Надавите вниз верхнюю часть спинки массажного кресла, чтобы оно откинулось назад примерно на 45° . (Смотрите рисунок 1)
2. Перемещайте массажное кресло вперед. Оно легко передвигается на колесах. После этого верните кресло в исходное положение после перемещения. (Смотрите рисунок 2)

Примечание:


1. Перед перемещением массажного кресла, верните подставку для ног в исходное положение. Иначе, это может привести к травме или поломке.
2. Не перемещайте массажное кресло, когда в нем кто-то сидит.
3. Положите под массажное кресло коврик, прежде чем его перемещать. Это сможет защитить пол от царапин.

Рисунок 1

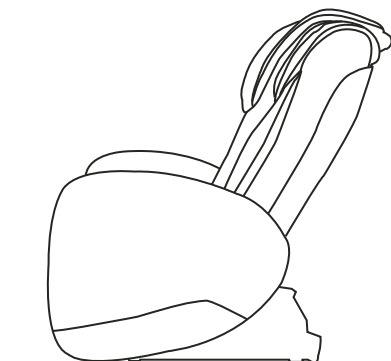


Пол

Рисунок 2

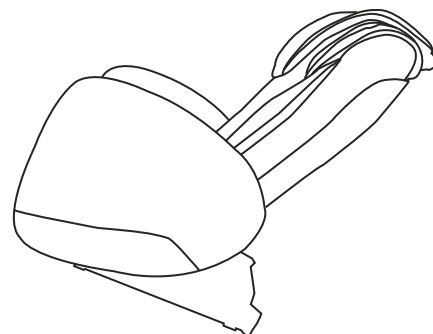

Пол

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

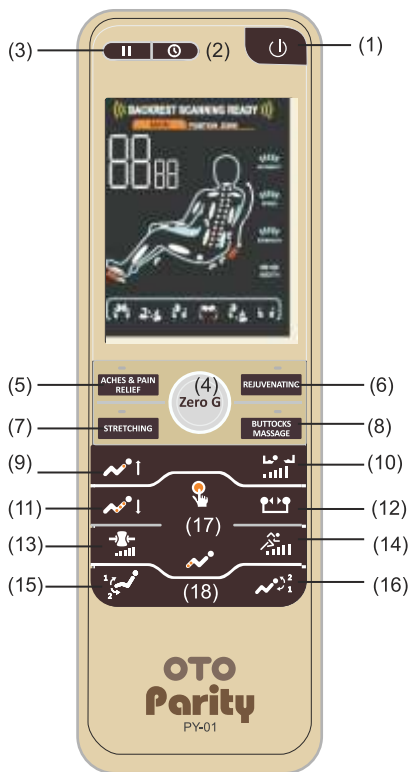


Функция	Кнопка	Ссылка	Функция	Кнопка	Ссылка
Питание	(1)	8	Выбор зоны массажа / Вниз	(11)	9
Таймер	(2)	8	Ширина массажа	(12)	9
Пауза	(3)	8	Интенсивность компрессии	(13)	9
Нулевая гравитация	(4)	8	Скорость массажа	(14)	10
Автопрограммы для всего тела	(5)-(8)	8	Управление наклоном кресла	(15)(16)	10
Точечный массаж / Вверх	(9)	8	Ручные режимы массажа	(17)	10
Интенсивность массажа	(10)	8	Режимы компрессионного массажа	(18)	10

ФУНКЦИИ МАССАЖА

1. Наклон Массажного Кресла

Наклон массажного кресла можно регулировать с помощью кнопок Управления наклоном кресла. Положение нулевой гравитации обеспечивает наиболее удобное размещение для массажа, а также наиболее комфортный угол наклона.

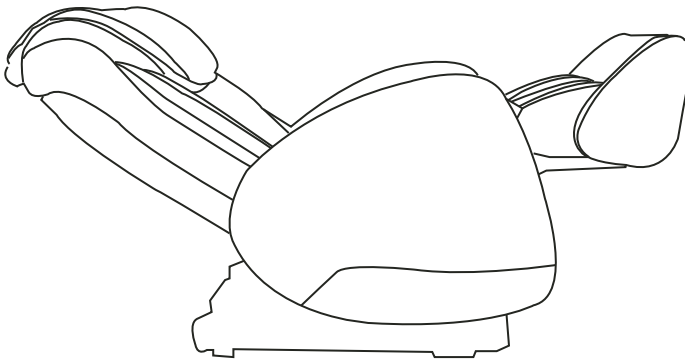

Позиция нулевой гравитации

2. Интенсивность Массажа

Интенсивность воздушно-компрессионного массажа можно регулировать с помощью кнопки Интенсивность компрессии путем изменения давления воздуха (5 уровней интенсивности).

Интенсивность и скорость роликового массажа в области спинки кресла регулируется с помощью кнопки Интенсивность массажа (сильный / слабый) и кнопки Скорость массажа (5 уровней скорости).

Массажное кресло имеет подголовник и накидку спинки. Если Вы хотите получить более глубокий массаж, то можете снять подголовник и накидку, чтобы увеличить интенсивность в области спины.

3. Растяжка Тела

Функция растяжки входит в состав автоматических программ “Aches & Pain Relief” (Снятие боли) и “Stretching” (Растяжка).

4. Воздушно-компрессионный Массаж

Функция паузы, включаемая в процессе выполнения воздушно-компрессионного массажа, улучшает циркуляцию крови в области стопы.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Подключите вилку питания к розетке и переведите выключатель в нижней части массажного кресла в положение “I”. При этом кресло перейдет в режим ожидания, в котором доступны только кнопки наклона спинки и подставки для ног, а также кнопка “Power” (Питание).

1. Кнопка Power (Питание)

- Запускает и останавливает все функции массажного кресла.
- Нажмите один раз и индикатор пульта управления начнет мигать, указывая на то что кресло находится в режиме ожидания.
- Для начала массажа, нажмите кнопку режимов массажа и таймер.
- Нажмите снова, чтобы остановить массаж. При этом массажные ролики, спинка кресла и подставка для ног вернуться в исходное положение.

Примечание: Если Вы наступаете на подставку для ног при выключении массажного кресла, пульт управления будет издавать звуковой сигнал. Когда Вы снимете ноги с подставки, пульт управления прекратит подавать звуковой сигнал, а подставка для ног вернется в исходное положение.

2. Кнопка Timer (Таймер)

По умолчанию время массажа составляет 15 минут для всех режимов. Каждое нажатие кнопки изменяет время, в последовательности 20>25>30>5>10>15>20 минут.

3. Кнопка Pause (Пауза)

Нажмите один раз, чтобы временно остановить все функции массажа. Нажмите еще раз, чтобы восстановить первоначальные функции массажа.

4. Кнопка Zero Gravity (Позиция невесомости)

Нажмите один раз, чтобы активировать функцию невесомости 1. Нажмите еще раз, чтобы перейти к функции невесомости 2. Нажмите еще раз, чтобы вернуться в исходное положение. Положение невесомости позволяет перевести тело в лучшее положение для массажа.

5 / 6 / 7 / 8. Кнопки Автоматические программы для всего тела

При активации одной из 4 автопрограмм, массажное кресло автоматически выполняет сканирование по высоте плеч. Вы также можете вручную настроить положение высоты плеч до желаемого удобного положения.

Примечание: Сядьте правильно при выполнении сканирования высоты плеч. Голова должна быть вплотную прижата к спинке кресла для получения лучшего результата сканирования.

6. Кнопка Rejuvenating (Автопрограмма Обновление):

Сочетает различные режимы массажа и предназначена для снятия стресса.

7. Кнопка Stretching (Автопрограмма Растяжка):

Комбинирует раскисывающее, растягивающее и воздушно-компрессионное воздействие; снимает боль и онемение мышц.

8. Кнопка Seat Massage (Автопрограмма Массаж ягодич):

Сочетает различные режимы массажа и выполняет массаж от талии до бедер.

9. Кнопка Точечный Массаж / Вверх

- Точечный массаж спины

Когда массажные ролики достигают желаемого положения, нажмите один раз, чтобы начать точечный массаж. Нажмите еще раз, чтобы отменить массаж.

- Перемещение массажа спины в положение вверх

Держите эту кнопку до тех пор, пока перемещаемые вверх массажные ролики достигнут нужного положения. После этого отпустите кнопку.

10. Кнопка Интенсивность массажа

5 уровней интенсивности воздействия массажных роликов.

После активации функции интенсивности массажа, каждое нажатие кнопки изменяет интенсивность массажа от слабой к более сильной.

11. Кнопка Выбор Зоны Массажа / Вниз

- Выбор зоны массажа

Для активации функции зоны массажа, нажмите кнопку один раз и массажные ролики зафиксируются в исходном положении для выполнения массажа в зоне шириной 8 см. Нажмите кнопку снова, чтобы выключить эту функцию.

- Перемещение массажа спины в положение вниз

Держите эту кнопку до тех пор, пока перемещаемые вниз массажные ролики достигнут нужного положения. После этого отпустите кнопку.

12. Кнопка Ширина

Кнопка управляет шириной размещения массажных роликов, которая имеет 3 уровня. Кратковременно нажимайте кнопку чтобы контролировать ширину размещения массажных роликов. Ширина последовательно изменяется от узкой, до нормальной и широкой.

13. Кнопка интенсивности воздушно-компрессионного массажа

Нажмите кнопку для активации функции воздушной компрессии с 5 уровнями интенсивности. Интенсивность компрессии последовательно изменяется в авто или ручном режиме работы, от слабого до сильного уровня.

14. Кнопка Скорость Массажа

Регулирует скорость работы массажных роликов с 5 различными уровнями. После активации функции Скорости Массажа, каждое нажатие кнопки последовательно изменяет скорость от медленной к более быстрой.

15. Кнопка Подъема / Опускания Подставки Для Ног

Кнопка регулирует угол наклона подставки для ног. Кратковременно нажмите кнопку 1, чтобы начать подъем подставки для ног. Нажмите еще раз, чтобы остановить перемещение. Нажмите и удерживайте кнопку 2 для опускания подставки для ног. Отпустите кнопку, чтобы остановить перемещение.

Примечание: Пульт управления будет издавать звуковой сигнал, когда подставка для ног достигнет самого нижнего уровня. При поднятии подставки вверх звуковой сигнал исчезнет.

16. Кнопка Подъема / Опускания Спинки Кресла

Кнопка регулирует угол наклона спинки кресла. Кратковременно нажмите кнопку 1, чтобы начать опускание спинки назад. Нажмите еще раз, чтобы остановить перемещение. Нажмите и удерживайте кнопку 2 для поднятия спинки кресла. Отпустите кнопку, чтобы остановить перемещение.

17. Кнопка Ручные Режимы Массажа

Эта функция позволяет выбрать один из 6 режимов массажа: разминающий, постукивающий, шведский, шиацу, комбинированный (разминающий с постукивающим) и раскатывающий. Нажмите кнопку один раз, чтобы активировать функцию разминающего массажа спины. Каждое дальнейшее нажатие активирует режимы массажа в следующей последовательности: постукивающий > шведский > шиацу > комбинированный (разминающий с постукивающим) > раскатывающий > Стоп.

18. Кнопка Режимы Воздушно-компрессионного Массажа

После включения массажного кресла, нажмите кнопку один раз, чтобы активировать воздушно-компрессионный массаж. Нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить массаж.

Порядок завершения работы массажного кресла

Нажмите кнопку Power (Питание), чтобы остановить массаж. При этом массажные ролики начнут автоматически передвигаться в стационарное положение, а индикация кнопки Power погаснет до тех пор, пока ролики не встанут в исходное положение. После этого переведите выключатель в нижней части массажного кресла в положение "0" и отсоедините вилку из розетки, после чего индикатор Power выключится.

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Этот раздел посвящен наиболее распространенным проблемам, которые могут возникнуть при эксплуатации массажного кресла. Если Вы не в состоянии решить проблему с помощью приведенной ниже информации, пожалуйста свяжитесь с сервисным центром ОТО или его представителем. Если возникшая проблема не описана в представленной ниже таблице, попробуйте выполнить следующие действия:

1. Выключите массажное кресло и отсоедините вилку из сети.
2. Подождите в течение 60 минут.
3. Подключите массажное кресло к электрической сети и перезапустите его.
4. Если проблема не устранилась, свяжитесь с сервисным центром ОТО.

Проблема	Возможная причина	Решение
Массажное кресло не работает	Массажное кресло не подключено к питанию правильно.	Проверьте соответствие напряжения питания массажного кресла с питанием сети в Вашем регионе и затем снова подключите кресло к питанию.
	У массажного кресла только что закончилось автоматическое время сеанса 15 минут и оно автоматически выключилось и перешло в режим ожидания.	Если Вы хотите продолжить массаж, повторно нажмите кнопку Power (Питание).
	Возможно Вы использовали массажное кресло без перерыва в течение 45 минут, из-за чего сработала защита от перегрева.	Отключите массажное кресло от сети и дайте ему остыть в течение 60 минут, после чего Вы можете использовать массажное кресло снова.
	На массажное кресло была оказана чрезмерная нагрузка.	Уберите нагрузку с массажного кресла и снова начните массаж.
Массажное кресло сильно нагрелось	Массажное кресло непрерывно работало большое количество времени.	Отключите массажное кресло от сети и дайте ему остыть в течение 60 минут, после чего Вы можете использовать массажное кресло снова.
Во время работы массажного кресла издается шум работающих механизмов	Этот звук вызван работой моторов и насосов массажного кресла.	Прослушивание звука механизмов вполне нормально и не означает, что массажное кресло неисправно.

ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для длительного использования кресла, соблюдайте следующие правила:

1. Массажное кресло должно обслуживаться и ремонтироваться только квалифицированным персоналом.
2. Перед чисткой кресла выньте вилку из розетки. Никогда не прикасайтесь к вилке мокрыми руками.
3. Протирайте кресло сухой чистой тканью. Не используйте при чистке обивки кресла жидкости на основе бензина или спирта.
4. Механические компоненты кресла не требуют специального обслуживания в течение всего срока эксплуатации.
5. Не толкайте кресло, пытаясь его передвинуть.
6. Не передвигайте кресло с включенным проводом электропитания.
7. Не устанавливайте кресло на неровную поверхность. Оно может упасть, что приведет к травмам.
8. Используйте кресло с перерывами в работе.
9. Не допускайте попадания внутрь кресла воды и других жидкостей.

Если кресло было повреждено, прекратите его использование и обратитесь за консультацией в сервисный центр ОТО или к авторизованному дилеру.

Если у Вас возникли вопросы по работе массажного кресла, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к представителю компании ОТО. Контактную информацию Вы можете найти на сайте www.otobodycare.ru.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	ОТО Parity
Модель	PY-01
Тип	Массажное кресло
Напряжение питания	АС 220-240В / 50-60 Гц
Мощность	140 Вт
Автоматический таймер	5/ 10/ 15/ 20/ 25/ 30 минут
Габариты (ДхШхВ)	Стационарное: 110 x 75 x 116 см Разложенное: 182 x 75 x 90 см
Вес	Брутто: 79,5 кг
	Нетто: 67 кг
Сертификаты	СЕ, РОСТЕСТ

OTO

OTO HOLDINGS LIMITED

26/F Pacific Plaza, 410 Des Voeux Road West, Hong Kong
(852) 2549 4611 • info@otobodycare.com.hk • www.otobodycare.com

Представительство в России: www.otobodycare.ru